

ORVOSTECHNIKAI ESZKÖZ - HASZNÁLATI UTASÍTÁS

 Olvassa el figyelmesen ezeket az utasításokat, mielőtt elkezdi használni ezt az orvostechnikai eszközt.

Glicerín végbélkúp 2,2 g – felnőtteknek és 12 éves kor feletti gyermekek számára 10 db végbélkúp

Összetétel:

Glicerín, nátrium-sztearát, víz

Felhasználás:

A glicerín végbélkúp olyan orvostechnikai eszköz, amely a megkeményedett beltartalom nagyon kíméletes ürítését segíti elő oly módon, hogy irritálja a végbél nyálkahártyát, ugyanakkor székletürítés során síkosító hatású.

A végbélkúpban található glicerín támogatja a bélürítést, a széklet lágyítását és nedvesítését. Növeli a széklet mennyiségét a vastagbél alsó részében, és megkönnyíti a székletürítést.

Ellenjavallat:

Ne használja ezt az orvostechnikai eszközt, ha akut hasi fájdalma, vagy más ismeretlen eredetű fájdalom van. Valamint, ne használja a glicerín kúpot bármely összetevőjével szembeni ismert túlérzékenység esetén, vagy ha korábban gyulladást vagy repedéseket tapasztalt a végbél területén, vagy ha vérző aranyere van.

Adagolás:

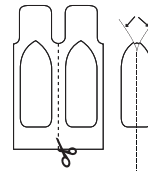
Glicerín végbélkúp 2,2 g: Felnőtteknek és 12 éves kor feletti gyermekek számára: napi 1 végbélkúp.

Hogyan kell alkalmazni a Glicerín végbélkúpot:

Tépje fel a fóliát a végbélkúp hegyes vége felett és távolítsa el a csomagolást. Helyezze be a kúpot a végbélbe, hegyes végével előre.









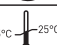

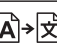

A hatás a használatot követő 30 percen belül jelentkezik. Egy glicerín végbélkúp azonnali, egyszeri használatra szolgál. Az újbóli felhasználás nem lehetséges és nem is kivitelezhető.

A Glicerín végbélkúp 2,2 g alkalmas terhes és szoptató nők számára.



Hogyan kell a Glicerín végbélkúpot tárolni:

Száraz helyen, +5°C to +25°C hőmérséklet között tárolandó! Gyermekek elől elzárva tartandó! Ne használja ha a csomagolás sérült. A csomagoláson feltüntetett lejárati idő után ne használja fel. Az eszköz használatával kapcsolatban bekövetkezett minden súlyos nemkívánatos eseményt jelenteni kell a gyártónak vagy az illetékes nemzeti hatóságnak.

	CE jelölés, Európai megfelelés
	Olvassa el a használati utasítást
	Gyártási szám
	Gyártás időpontja
	Lejárati idő
	Ne szennyezze a környezetet – a használt csomagolóanyagokat dobja a megfelelő tárolóedénybe
	Gyártó
	Nem újrahasználandó
	Hőmérsékleti tartomány
	Orvostechnikai eszköz
	Fordítás
	Forgalmazó